



Brazo de Punción IV Pediátrico

Cod: 3001-0020



Producto importado y distribuido exclusivamente por Skill Training.
Avenida del Valle 932 Of. 205, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago.
Fono: +56 23 252 6600

Acerca del producto

El brazo de entrenamiento inyección IV es de tamaño natural, anatómicamente correcto y representa un brazo de paciente pediátrico.

Fabricado con materiales de calidad, así como la fácil sustitución de sus partes, este modelo ofrece una prolongada vida útil.

Instrucciones de uso

1. Conecte una de las mangueras del dispositivo a una matriz de suero o sangre simulada.
2. Permita que el líquido fluya por el sistema hasta la salida por el otro extremo del circuito.
3. Regule el flujo a través de la compresión de la manguera de salida.
4. El simulador está listo para su uso.

Nota: Para prolongar la vida útil del simulador, se recomienda el uso de agujas o branulas calibre 23G, 24G o mayor.

Sustitución de la piel y las venas

Qué hacer cuando se produce una filtración excesiva en los sitios de punción, reemplace el set de venas y / o piel.

Reemplazo de la piel

Cortar la piel y eliminarla. Esto se puede hacer con un cuchillo afilado o un bisturí. Cuando termine, deseche la piel.

Fijar las venas

Colocar las nuevas venas en las ranuras del brazo al lado de la ranura del mandril. Deje suficiente espacio para que las venas sobresalgan a ambos lados del simulador.

Fijar la piel

- a. Lave el interior de la piel del brazo con agua y jabón.
- b. Deslice la piel del brazo sobre el brazo y los dedos.
- c. Enjuague el exceso de jabón y deje secar.

Cuidado y mantención

- a. La superficie se limpia con un jabón suave y agua tibia. NO limpie el simulador con solventes o materiales corrosivos, ya que lo dañarán.
- b. Nunca coloque el simulador en cualquier tipo de papel o de plástico impreso. Estos materiales, así como los bolígrafos, transferirán manchas indelebles sobre la piel.
- c. Guarde el simulador en lugar libre de humedad y sin exponer a luz solar.
- d. Lubricar sitio de punción antes de realizar el procedimiento.
- e. Nunca utilice agujas o branulas menores a 22G.
- f. Para la preparación de sangre simulada, utilice la recomendada por el proveedor.